



なごや福祉用具プラザ広報誌

何かと出会って 新たな発見

暮らしほつとワーク

ーバリアフリーへのかけ橋ー

Vol.85

July 2025



二子山公園【春日井市】

特集

なごや福祉用具プラザの取り組み

ICT サポートセンターとは?P2~4

製作・改造事例の紹介..... P5

新ネタ発信..... P6~P7

ICTサポートセンターとは？

なごや福祉用具プラザでは『愛知県障害者社会参加促進事業』として、愛知県から委託を受けて、障害のある方に向けてパソコンなどのICT関連機器の利用相談・情報提供・使いやすくする環境整備などの支援を行う「ICTサポートセンター」を運営しています。また同センターでは、ICTボランティアの養成や講習会の実施など、支援する側のスキルアップをはかる活動も行っています。今回は、コミュニケーションをとるうえでの「困った」を解決する「ICTサポートセンター」についてご紹介します。



ICTとは

情報(information)や、通信(communication)に関する技術の総称。IT(Information Technology: 情報技術)と同様の言葉となります。

利用される方への支援

ICTに関する支援・利用相談・情報提供

障害のある方を対象に、身体状況や使用目的に応じて、パソコンなどのICT機器の利用相談や情報提供、各種勉強会を行っています。なごや福祉用具プラザへの来所相談はもちろん、ご希望に応じて訪問相談も実施します。

【対象となる方】

- 肢体不自由(上下肢・体幹等)、音声・言語、視覚、聴覚などに障害のある方
- 愛知県内にお住まいの方
- その他、難病などでICT関連機器を生活や就労場面で利用したい方



視覚に障害がある方への支援



肢体不自由がある方への支援

例えば、このような相談に対応しています

パソコンなどの操作が難しいので、自分に合った入力装置が欲しい

スイッチ入力でパソコンを操作してメールを出したい

テレビだけでなくベッドも操作したい

耐用年数を過ぎたので更新したい




このような対応をしました



【機器やソフトの選定】視線入力装置



【スイッチの選定・適合】接点式入力装置

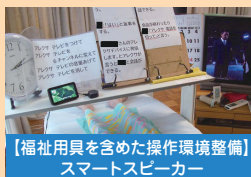

【福祉用具を含めた操作環境整備】スマートスピーカー



【新しいパソコンへの移行支援】意思伝達装置

- スwitchの選定・適合
- 福祉用具を含めた操作環境整備
- 操作のための製作改造(自助具、スイッチを含む)
- 新しいパソコンへの移行支援

- 設定・トラブル対応
- 機器やソフトの選定
- パソコンやソフトの試用
- 福祉制度利用の説明
- 勉強会の開催



【福祉用具を含めた操作環境整備】スマートスイッチ



視覚障害者のためのスマホ・タブレット勉強会

機器購入の際に利用できる制度が知りたい

パソコンを買ったが設定がうまくいかない

自分ではボタンを押せないで代替方法を知りたい

旅行のときにスマートフォンで位置情報を知りたい

ICT機器についてお困りのことがあれば、なごや福祉用具プラザにご相談ください

さらに、日々進化するICTに関する情報収集や講習会の開催を通じて、支援者のスキル向上の機会も提供しています。

※上記以外の日程も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

ICTサポート相談

ICTボランティアの派遣

ICTボランティアの育成

個別相談で提案した内容を各機関と共有し、ノウハウの周知に努めています。

年度	パソコン本体やソフトウェア	パソコン周辺機器や操作スイッチ	コミュニケーション機器や意思伝達装置	その他	日常生活用具給付等の制度	訪問件数
令和元年度	320	420	180	10	14	150
令和2年度	450	420	200	10	10	160
令和3年度	550	350	210	10	17	210
令和4年度	450	300	200	10	6	200
令和5年度	530	320	240	10	43	240
令和6年度	500	350	240	10	49	245

名古屋市

市名	人口 (千人)
西區	16
北區	12
守山區	2
東區	12
千種區	34
名東區	14
中村區	6
中區	3
昭和區	51
中川區	8
熱田區	4
瑞穂區	2
天白區	22
港區	7
南區	3
綠區	25

名古屋市 以外

市名	人口 (千人)
尾道市	1
半田市	3
春日井市	3
小牧市	5
瀬戸市	4
西尾市	1
一宮市	2
津島市	2
岡崎市	1
知多市	2
長久手市	1
豊川市	1
豊橋市	1
阿久比町	1

例えば、このような課題が挙げられました

- タイミングの難しさ
- 必要性の認識不足
- 進行状況に応じた提案の困難さ
- 支援開始の遅れ

- 支援者の知識・経験不足
- 関係者間の連携不足
- 機器選定の困難さ

- 行政の対応の変化
- 市の予算不足
- 事業所の不足
- アフターフォローの不十分さ

- 試用機会の不足
- 患者宅での調整
- 進行が早い場合の対応
- 装置導入後の管理

- 相談先の不明確さ
- 周知の不足
- 情報不足
- 患者教育の難しさ

3

補装具装用訓練等支援事業

なごや福祉用具プラザでは令和7年度に厚生労働省『補装具装用訓練等支援事業』に取り組めます。この事業は、小児筋電義手や重度障害者用意思伝達装置の装用訓練に対応できる病院やリハビリ施設の普及を目的としています。

この事業を活用して重度障害者用意思伝達装置に関する利用者支援や支援者養成に取り組み、地域の支援体制の強化や支援ネットワーク作りを促進します。

装用訓練等への同行支援と機器貸出体制の整備

意思伝達装置の装用訓練を担う支援者を養成する研修会を開催し、修了者からの相談には、訓練への同席や利用者宅への同行など必要な支援を行います。

なごや福祉用具プラザでの実践経験を活かし、選定・適合から訓練に至る支援の実際を共有し、地域の支援機関との連携を促す助言も行います。

あわせて、意思伝達装置や固定具、入力装置などを整備し、支援状況に応じた機器の貸出体制を整えます。

支援者養成のための研修

県内を尾張・西三河・東三河の3圏域に分けて段階的な研修を実施し、地域の支援体制の強化を図ります。令和7年度は「基礎編」として以下の内容で実施予定です。

対象者	医療機関、居宅・相談支援事業所、訪問看護・介護事業所、保健所、市町村職員など
研修内容	●補装具装用訓練等支援事業の紹介 ●関連制度と申請手続きの基礎知識 ●意思伝達装置・固定具・入力装置の基礎知識と体験 ●機器の選定・適合に関する基礎知識 ●支援事例の紹介と共有

連携強化とネットワーク構築

研修修了者の同行支援には地域支援機関も加わり、利用者を中心とした連携を強化します。


また、研修でのグループワークや事例共有を通じて、支援者同士のネットワーク作りも促進します。

ICTボランティアの発掘と養成

地域の支援体制強化のため、以下の機会を活用してICTボランティアを発掘・育成します。

ボランティア講習	
対象	登録ボランティア、過去の受講者
内容	意思伝達装置や入力装置の説明と体験
福祉用具プランナー認定講習	
対象	講習受講者
内容	コミュニケーション用具に関する講義と装置体験
学生向け講座	
対象	作業療法・理学療法・看護学科の学生
内容	意思伝達装置の紹介と体験
ふれあい健康まつり	
対象	一般市民
内容	意思伝達装置の体験ブース設置
常設展示	
対象	来館者
内容	装置や周辺機器の展示と案内（通年実施）

■各機関との連携状況

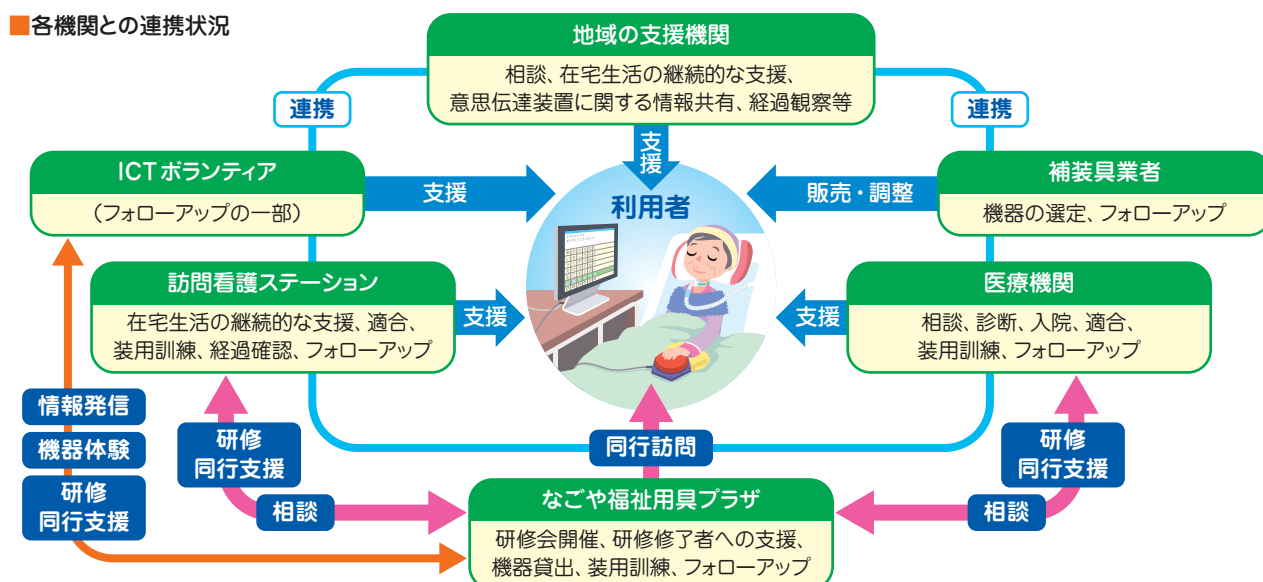



プラザの利用者さんへ
自助具を提供した事例

製作・改造事例の紹介

エレベーターのボタン等を押せる自助具の製作

電動車椅子を使っている脳性麻痺の女性から、「これまで、エレベーターを使う際にボタンに手を伸ばせないのて近くにいる方に押ししてもらっていたのですが、自分でボタンを押したいので道具で解決できないでしょうか。」とご相談がありました。

そこで帽子に棒を取り付けて、エレベーターの上下階ボタン等を押せる自助具を製作しました。

材料リスト

- | | |
|-------------------|-----|
| ●アルミパイプ(9φ×255mm) | 1本 |
| ●プラスチックのキャップ | 1個 |
| ●ネジ・ナット | 3か所 |
| ●帽子(本人が持参) | 1つ |

材料費

300円程度



帽子型自助具の外観

作り方

アルミパイプへ直径3mmの穴を3か所開けて、次に帽子のつばへも同じように3か所穴を開けます。帽子のつばの表側へアルミパイプを置き、つばの裏からネジを通してナ

ットで固定します。そしてアルミパイプの先端へキャップをはめます。

工夫した点

帽子のつばにアルミパイプを取り付けるため重量と位置を考慮し、電動車いすをエレベーターのボタンのある位置へ十分に寄せられるか、エレベーターのボタンを押す操作がスムーズにできるかどうか、本人の意見もお聞きしてパイ

プの長さを決めました。

パイプの先端にはプラスチックのキャップをはめて表面積を増やし、ボタンをしっかりと押せるようにしました。


使い方

本人がこの帽子をかぶり、エレベーターのボタンが押せる位置へ電動車椅子で近づいて、首を前に出し、この自助具の先端でボタンを押します。

なお、実際にボタンを押す際にはある程度の力が必要であり、帽子がズれる可能性もあったので帽子の天頂に髪留めをはさんでズレを防止しました。



エレベーター前でボタンを押す様子

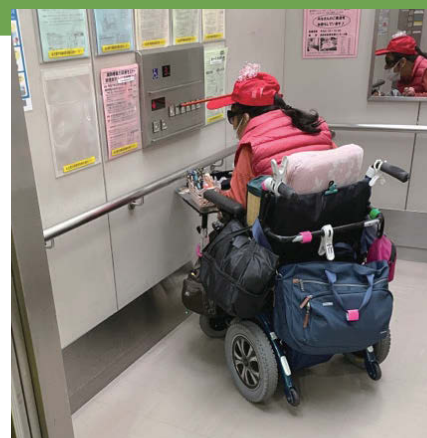

エレベーター内でボタンを押す様子

なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、
ご本人やご家族等の生活を豊かにするお手伝いをします。お気軽にご相談ください。



新ネタ発信 | なごや福祉用具プラザ 追加展示品のご紹介です。

なごや福祉用具プラザでは、年2回の常設品展示の選定と毎月の新製品展示の選定を行っています。新しい機能や工夫がある福祉用具が増えています。是非、一度ご覧になってお確かめください。

ドライブサポートシート

価格 86,000円(非課税)
重量 3.0キログラム
特徴 フレームレスで乗せ降ろし簡単。安全安心の5点式ベルトと大きめの体幹パッドでしっかり姿勢保持。大人から子供まで幅広く、これ1台で共有できるので送迎車にピッタリ。



<オプション>

- ヘッドレスト 9,700円(税別)
- 背シートパッド3,600円(税別)
- 座面28,300円(税別)
- 体幹センターパッド2,600円(税別)

※オプション品は本体と同時に購入の場合、全て非課税になります。

のせかえくんスライド



価格 56,000円(税別)

重量 2.0キログラム

特徴 ベッドから車いすなどの移乗をサポートする移乗用ボードです。滑りやすいシートのため、移乗動作はもちろん抜き差しも簡単に行えます
<オプション>アウターシート 14,000円(税別)

汚トイレ美化マット

価格 2,100円/15枚入り(税別)

重量 0.3キログラム

特徴 表面の不織布層が水分を吸収し、裏面のラミネート層が水分を裏側に通しません。ラミネート層はノンスリップ加工により滑りにくい仕上がりです。



男性用パッド内蔵型吸収パンツ 最大吸収量40ml

価格 4,500円(税別)

特徴 V型構造の吸収体でスポット吸収。表面に広がりにくい。縫製の工夫で伝いもれしにくい設計。日本製。

※一回あたりの軽度の失禁量を約5mlと想定。
5ml×8回 最大吸収量40ml。ただし失禁量には個人差があります。展示品はMサイズ



Universal Tape (ユニバーサルテープ)



価格 2,500円(税別)

重量 0.055キログラム

特徴 テープを巻くだけで簡単オーダーメイド。自助具用のDIYテープとして、文具やカトラリー製品の滑り止め・グリップ性などの効果が期待できます。食洗器OK。糊残り無し。



らくラク案内・靴下

価格 1,800円(税別)

特徴 踵上部の持ち手でひっぱり上げやすい、はきやすさを追求し、ゆったりした足口。男女兼用。日本製。



※BE・PUは花柄、GY・KOはライン柄

パッド内蔵型吸収ショーツ

1 最大吸収量25ml 2 最大吸収量50ml

価格 1 2,800円(税別)

2 3,300円(税別)

特徴 マチ部はV型構造の吸収体でしっかり保水し、縫製の工夫で伝いもれしにくい設計。日本製。

※一回あたりの軽度の失禁量を約5mlと想定。ただし失禁量には個人差があります。展示品はMサイズ



1 5ml×5回
最大吸収量25ml



2 5ml×10回
最大吸収量50ml

【使い切りインナー】AnyAnyインナー ブラ&ショーツセット

価格 450円(税別)

特徴 災害時や入院時等に!ラクな着用感の使い切り下着。紙素材(パルプ40%)と不織布を使用した1回着用の使い切りタイプ。M-LLワンサイズ 軽量・コンパクトなので持ち運び便利。

※ブラ&ショーツセット(各3枚入り900円)、ショーツセット(3枚入り450円)(7枚入り900円)もあります。(価格はすべて税別)



全開パジャマトップ(長袖・マジックテープ®)

価格 11,000円(税別)

特徴 寝たまま、座ったままでも着替えやすいパジャマ(トップ)です。前中心と袖下から脇にかけての「マジックテープ®ボタン」を使用しており、介護・診察などの時の着脱がラク。



全開パジャマボトム(ファスナー)

価格 11,000円(税別)

特徴 寝たまま、座ったままでも着替えやすいパジャマ(ボトム)です。左右のファスナーで上下から開閉する設計。ヒップゆったりで、おむつ着用でも快適なはきごころ。



※「特徴」の項目は、申請企業の説明文を転記しております。
 ※試用体験や製品に関するお問合せは、なごや福祉用具プラザの相談カウンターまでどうぞ。



ご紹介できなかった半年間の期間限定の新製品、追加常設品もあります。是非一度プラザまで足を運びになって、福祉用具に触れてお確かめください。



暮らしほっとワーク



なごや福祉用具プラザ

暮らしほっとワークweb版では、過去に紹介した展示品もご覧いただけます。
 常設品は、なごや福祉用具プラザのホームページから検索できます。

価格等が変更になっている場合があります。また、現在は展示していないものもあります。

参考価格に【税別】表記があるものは、表示価格に加え、消費税10%が必要となります(非課税品目を除く)。

1 PCEye5 2 TCスキャン

1 価格 220,000円(税別)

重量 0.093キログラム

特徴 付属ソフトをインストールするだけで、視線入力ですべてのマウス操作が可能になります。Windows用の様々なソフトを視線で操作し、容易に仕事や娯楽に活用いただけます。

2 価格 480,600円(非課税)

重量 2.0キログラム

特徴 様々なスイッチだけでなく、視線入力にも対応している意思伝達装置です。直感的な操作でパソコン知識がなくても使用でき、利用者の状態に合わせた画面設定・編集が可能です。

付属品: Joyスイッチ※単品及び追加購入の場合: 21,780円(税込)
 【オプション類】●PCEye5 220,000円(税別) ●PPSスイッチ 40,000円(税別) ●Eye コール 57,100円(税別)



マイコン電気圧力鍋 3.0L やわらかさん

価格 21,000円(税別) 重量 3.6キログラム

特徴 ◆慣れ親しんだご自宅の味で介護食が作れますので飽きずに毎日お食事を楽しめます。◆嚥下食コード3「舌でつぶせるやわらかさ」をご自宅で再現できます。◆「介護食レシピ」「普通食39レシピ」が付いています。◆火を使わず、簡単にやわらかく作れます。◆やわらかカッターと新レシピを追加。蒸しずをハンドル付き蒸しずに変更した、やわらかさんプラス28,000円(税別)も販売しています。



角度調節付 あがり框

価格 100,000円(税別)

重量 42.0キログラム

特徴 置き型で工事不要です。手すり部分は、高さだけでなく角度調節ができます。スタンド部分を取り外し、片側のみでの使用も可能です。

<オプション>
 小型タイプ(ベース600mm×450mm)
 ※片手すり用 重量28kg。



タカノクッション MOLA

1 フラットタイプ 2 コンタータイプ

価格 1 25,000円(税別) 2 28,000円(税別)

重量 1 0.98キログラム 2 1.1キログラム

特徴 MOLAは「もっちり」で「しっかり」座れる新しい感触の車いすクッションです。イスづくり60年のノウハウを集結し、高い体圧分散性と姿勢保持性の両立を実現しました。

<オプション>

●アウターカバー 8,000円(税別) ●インナーカバー 6,500円(税別)



子ども用シャワーチェア SOCOTTO

価格 100,000円(税別)

重量 4.2キログラム

特徴 シート部は、ソフトなクッションタイプです。ご使用後は水を払って拭き取ればすぐ乾き、カビの発生を防ぎます。ユニットバスの洗い場でも使いやすいコンパクトサイズです。

<オプション>

●脚部 35,000円(税別)
 ●サポートベルト 12,000円(税別)



アウルケア 70C 400 幅

価格 28,000円(税別)

重量 1.3キログラム

特徴 アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持クッション。体圧分散性に優れたエクスジェルを全面に配置することで、大腿部までカバーしています。



<オプション>
 替えカバー 6,500円(税別)

PATATTO (パタット) 正座

価格 1,450円(税別)

重量 0.18キログラム

特徴 樹脂製の正座専用折りたたみイス。薄く折りたたみため軽量、収納・持運びが便利。耐荷重100kg、水や汚れを弾き丈夫でお手入れ簡単。座面は曲面仕様で座りやすく、綺麗な姿勢をサポート。



PATATTO (パタット) 1 350+ 2 250+

価格 1 5,800円(税別) 2 4,300円(税別)

重量 1 1.4キログラム 2 0.63キログラム

特徴 樹脂製の折りたたみイス。薄く折りたたみため軽量、収納・持運びが便利。耐荷重100kg、水や汚れを弾き丈夫でお手入れ簡単。室内外で普段使いができ、非常時はトイレとして使用可能。

<オプション>

非常用トイレ袋5回分 15年保存可 800円(税別)

セット内容: 抗菌性凝固剤(吸水性樹脂)5個・排便袋(PE)・防臭袋(PE/PET)2枚





動画で
知る・学ぶ

なごや福祉用具プラザ

YouTube チャンネルのご紹介

生活の中での“困ったこと”を解消する福祉用具や介護ロボット、技術ボランティアが製作した自助具の紹介と使い方の解説や福祉・介護に関心のある方向けセミナーのアーカイブ配信など、福祉用具に関わる役立つ情報を配信しています。



なごや福祉用具プラザ



こんなことを配信しています



福祉用具の紹介



介護ロボットの紹介



自助具の紹介



セミナーの配信




社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

なごや福祉用具プラザ

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL(052)851-0051
FAX(052)851-0056

- 営業時間/AM10:00~PM6:00
- 営業日/火曜日~日曜日
- 休業日/月曜日・祝休日・年末年始
※月曜日が祝休日にあたる日は翌日も休みになります

- ホームページ/https://www.nagoya-rehab.or.jp/plaza/
- 電子メール/n-plaza@nagoya-rehab.or.jp

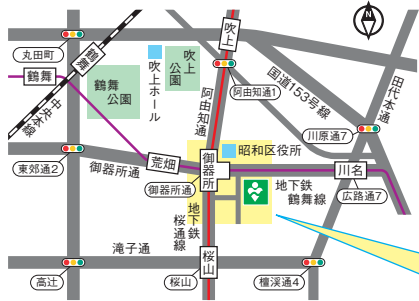

暮らしほっとワーク第85号 | 発行日/令和7年7月15日
編集・発行/なごや福祉用具プラザ

この広報誌は再生紙
(古紙リサイクル配合率100%、
白色度83%)を使用しています



暮らしほっとワーク

検索

バックナンバーはこちらからご覧いただけます。



NTP名古屋トヨペットの

ウェルキャブ

トヨタウェルキャブ全車種取り扱い

お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう、乗り降りを助ける機能を装備したウェルキャブシリーズ。

NOAH

ノア
車いす仕様車タイプ1
(車いす1名仕様)



※車いすは含まれません。

sienta

シエンタ
車いす仕様車タイプ1
(助手席側セカンドシート付)



※車いすは含まれません。

HIACE

ハイエース
車いす仕様車
Fタイプ



※車いすは含まれません。

ウェルキャブ ステーション

NTP名古屋トヨペットのウェルキャブステーションでは実際のウェルキャブを展示。介助専門士やウェルキャブコンサルタントが常駐し、ご希望を詳しくうかがいながら最適なウェルキャブ選びをサポートいたしております。

豊橋下地店

〒440-0083 豊橋市下地町境90番地
0532-53-7231

上重原店

〒448-0031 刈谷市東新町6丁目48番地3
0566-24-3338

瀬戸店

〒489-0808 瀬戸市見付町37番地
0561-83-3161

トヨタ248店

〒471-0874 豊田市前田町5丁目15番地の1
0565-31-7611

千種内山店

〒464-0075 名古屋千種区内山3丁目7番3号
052-741-1101

上記以外にも、ウェルキャブシリーズをご用意しています。
販売状況によりご注文いただけない場合がございます。
詳しくは営業スタッフにおたずねください。

ご存知ですか?

Welcab(福祉車両)シリーズはどなたが購入しても

「消費税非課税」です!
さらに、環境対応車(エコカー)は優遇税制が適用されます。

- ★車いす等を車両に載せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装備をした車両。*
- ★お身体の不自由な方が運転できるように指定の運転補助装置を装着した車両。*
- ★リフトアップシートは車いす等の昇降装置として認められています。

※仕様により課税となる場合があります。

NTP名古屋トヨペット

定休日/毎週月曜日 本社/〒456-8555 名古屋市熱田区尾頭町2番22号

NTPグループお客様相談センター

0120-039-758

(365日・24時間 受付いたします)

ホームページはこちらから
www.ntp.co.jp

※掲載の内容は5月9日現在の内容です。



NTPの
ウェルキャブ
はこちら

